

LINHA DE AUTOCLAVES

VIDA

AUTOCLAVE HORIZONTAL SILENCIOSA VIDA

**NOME TÉCNICO: Autoclave Horizontal Vida
Gravitacional Silenciosa 75L vertical - Branca**

CAPACIDADES: 75L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Registro ANVISA 81617749004
- Bivolt
- Frequência de 50/60 Hz
- Temperatura padrão de 121°C, 124°C, 127°C, 130°C e 134°C
- Pressão de trabalho de 1 a 1,5 kgf/cm²;
- Bandeja em alumínio;
- Acessórios inclusos: 02 bandejas, 01 mangueira;
- Assistência técnica com ampla rede em todo o Brasil, com atendimento realizado por profissionais capacitados;
- Norma ISO, equipamento produzido em conformidade com a norma NBR ISO 13485/2016
- Garantia de 1 ano.



CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: em aço inox AISI 304. O aço inoxidável é um material nobre indicado para a fabricação das câmaras de esterilização. É muito mais resistente e seguro que o alumínio e possui uma vida útil maior.

VEDAÇÃO: Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização.


SECAGEM: É possível escolher entre a secagem dentro do próprio ciclo, após a esterilização com a porta entre aberta e com a resistência ligada. Há também a possibilidade de realizar a secagem após a conclusão completa do ciclo, deixando a porta fechada, porém é aplicado uma carga de tensão na resistência até que atinja determinada temperatura e desligue, quantas vezes forem necessárias para secar os mais diversos materiais;

FECHO DA PORTA: : Mecanismo de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial, um dispositivo patenteado que impede a abertura da tampa enquanto houver pressão interna e oferece maior durabilidade, segurança e suavidade no acionamento.

PAINEL: Visor Digital com indicação de valores relativos ao funcionamento da autoclave. QR Code com link para acessar site, telefones, manual de instrução e assistência técnica Stermax.


ÁGUA, VAPOR E ABASTECIMENTO: Drenagem da água e vapor excedente através de mangueira de descarga até o galão de descarte (não acompanha o galão). Ciclo confinado de vapor, não libera vapor no ambiente. Água limpa a cada ciclo. Abastecimento manual de água.

ESTRUTURA: Gabinete e Porta construídos em aço carbono – resistente e robusto.

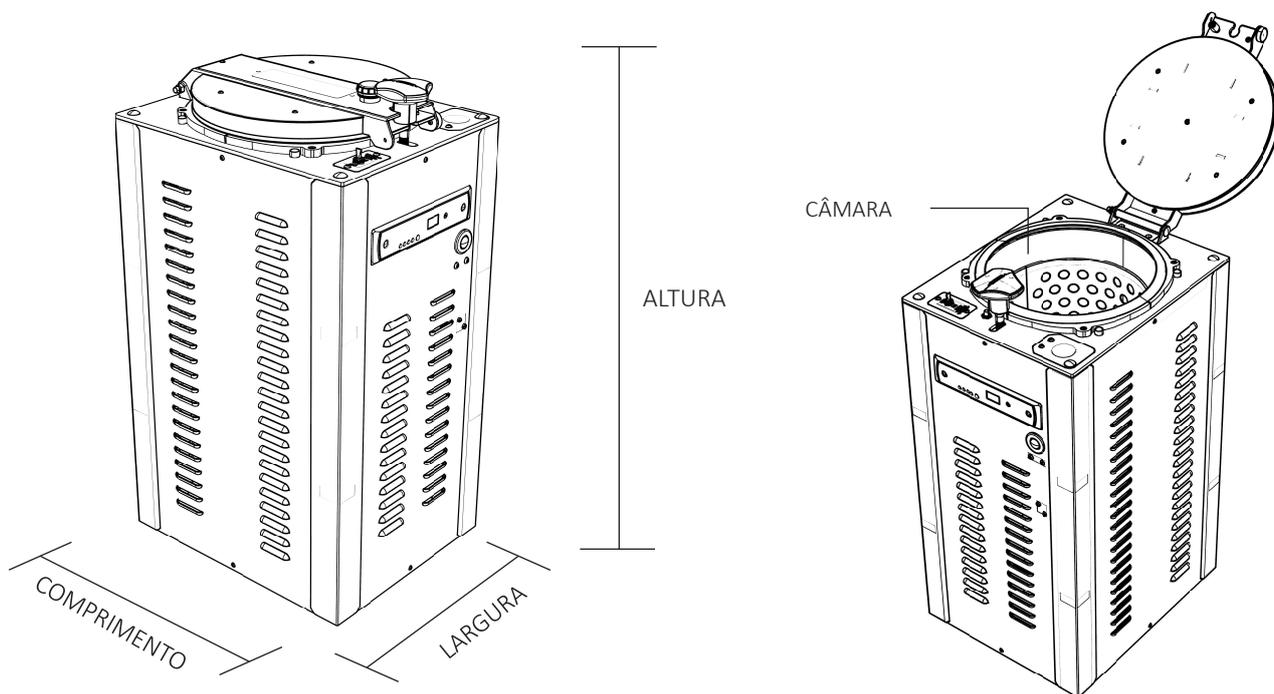

MEDIDAS DO EQUIPAMENTO


Modelo	Comp.	Largura	Altura	Peso Bruto
75L	52 cm	43 cm	95 cm	52 kg

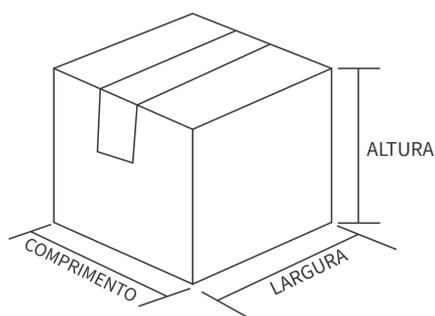

MEDIDAS EMBALADOS

Modelo	Comp.	Largura	Altura	Peso Bruto
75L	61,5 cm	58 cm	106 cm	58 kg

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

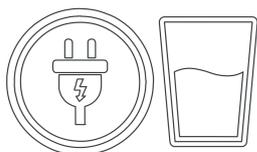

Modelo	Voltagem	Potência	Amperagem	Quant. de Água
75L	127V/220V	1600 W	12,6 A	350 ml